

NASOCHECKcomfort Antigentest 1er Pack





Der Unkomplizierte Test, Schritt für Schritt der Schnellanleitung folgen

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

4,80 €

Steuerbetrag 0,77 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [Lepu Medical Technology Co., Ltd.](#)

Beschreibung

NASOCHECKcomfort Corona-Antigen-Laientest (Nasenabstrich)

Die aktuelle Testkarte basiert auf der spezifischen Antikörper-Antigen-Reaktion und der Immunoanalyse-Technologie.

Die Testkarte enthält einen kolloidalen goldmarkierten monoklonalen Antikörper mit dem Protein SARS-CoV-2 N, der auf dem Kombinations-Pad vorbeschichtet ist, einen passenden monoklonalen Antikörper mit dem Protein SARS-CoV-2 N,

der auf dem Testbereich (T) immobilisiert ist, und einen entsprechenden Antikörper im Qualitätskontrollbereich (C).

Während des Tests verbindet sich das N-Protein in der Probe mit dem kolloidalen, goldmarkierten monoklonalen N-Protein-Antikörper SARS-CoV-2, der auf

dem Kombinations-Pad vorbeschichtet ist. Die Konjugate wandern unter Kapillarwirkung nach oben und werden anschließend von dem im

Testbereich (T)

immobilisierten monoklonalen N-Protein-Antikörper aufgefangen.

Je höher der Gehalt an N-Protein in der Probe ist, desto mehr Konjugate werden eingefangen und desto dunkler ist die Farbe im Testbereich.

Die Linie im

Testbereich (T) kann also mehr oder weniger stark ausgeprägt sein.

Befindet sich kein Virus in der Probe oder ist der Virusgehalt niedriger als die

Nachweisgrenze, so ist im Testbereich (T) keine Farbe zu erkennen. Unabhängig

davon, ob das Virus in der Probe vorhanden ist oder nicht, erscheint ein roter

Streifen im Qualitätskontrollbereich (C). Der rote Streifen im Qualitätskontrollbereich (C) ist ein Kriterium für die Beurteilung, ob genügend Probe vorhanden

ist oder nicht und ob das Chromatographieverfahren fehlerfrei funktioniert hat oder nicht